


Nepus(NE-SM1)

세정 방법



세정 방법 동영상


STEP 1
간편
세정하기
(매회)

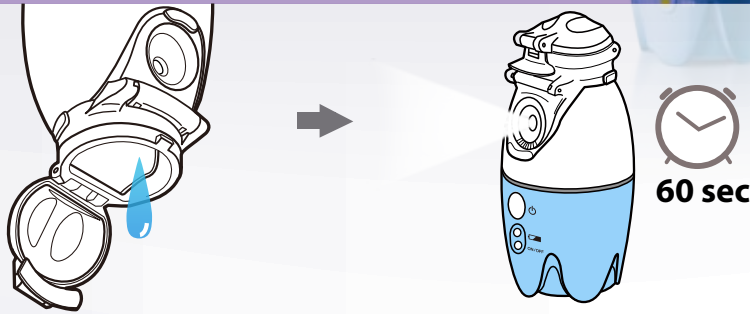

1) 제품 사용 후 깨끗한 물을 반정도 넣고 가볍게 흔들어 세정 후 물을 비웁니다. (이 과정을 2-3회 반복합니다.)

2) 약물통에 물(소독액 금지)을 넣고 1분간 분무합니다. 온수를 사용하면 더욱 좋습니다.


STEP 2
액세서리
세정하기
(매회)

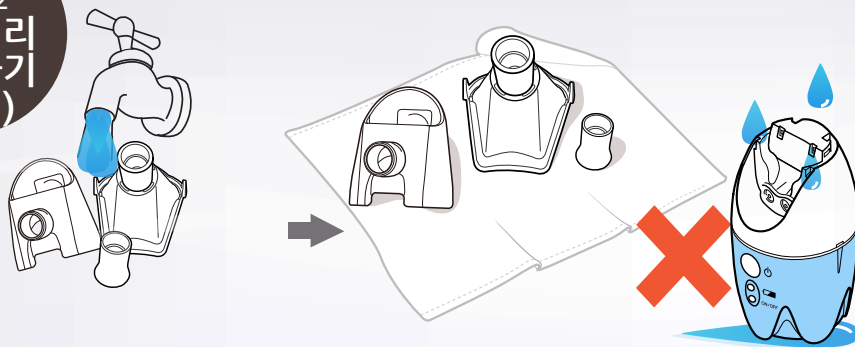

1) 흐르는 물에 가볍게 흔들어서 세정합니다.

2) 세정 후 바로 키친타올이나 거즈로 물기를 잘 제거하고 자연건조 시킵니다.


세정하기
(필요시)

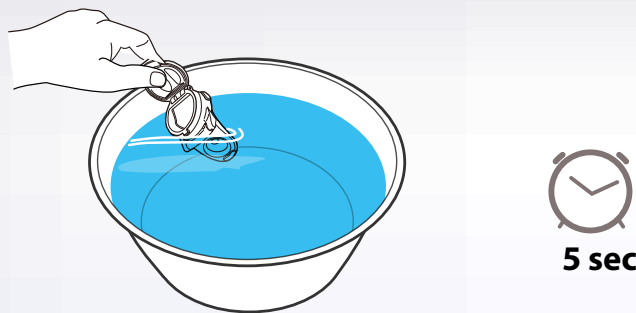

1) 약물통(메쉬카트리지 결합)을 상온의 물 혹은 온수 담은 용기에 5초 내외로 담가 가볍게 흔들어서 세정합니다.

2) 세정 후 바로 키친타올이나 거즈로 물기를 잘 제거하고 자연건조 시킵니다.

액세서리
살균하기
(필요시)

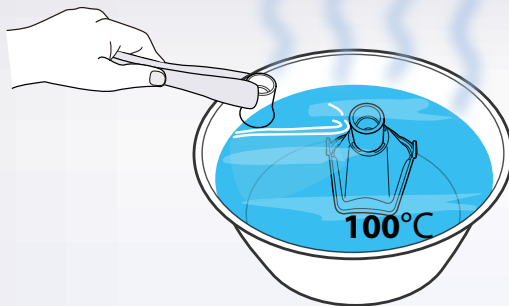

1) 뜨거운 물(100°C)에 1분간 담가 살균합니다.

2) 살균 후 바로 키친타올이나 거즈로 물기를 잘 제거하고 자연건조 시킵니다.

제품 및 A/S관련 문의는 케이티메드(주)으로 연락 바랍니다
전화: 02-2108-7890
상담시간: 평일(주말,공휴일은 제외) 9:30 -12:00,13:00 -17:00


Nepplus(NE-SM1)

주의 사항




주의 사항 동영상

STEP 1
간편
세정하기
(매회)

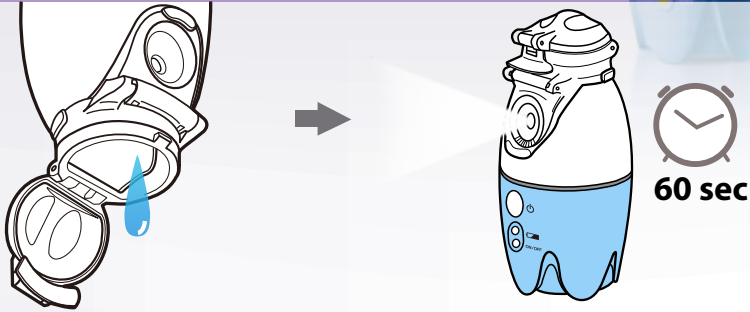


- 다른 세정제(식염수포함)를 사용하면 절대 안됩니다.
- 반드시 깨끗한 물로 세정 바랍니다.

STEP 2
액세서리
세정하기
(매회)

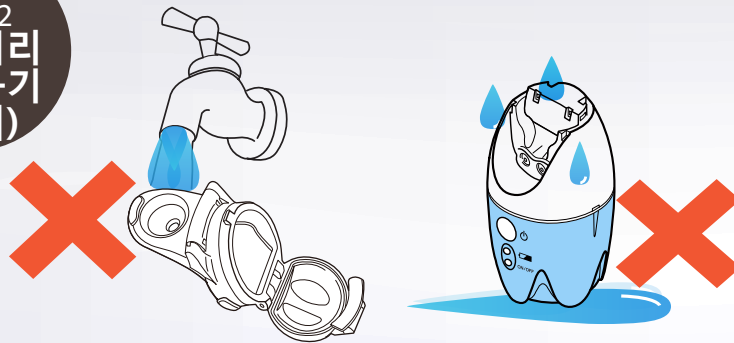


- 약물통(메쉬카트리지)은 흐르는 물에 세정하면 안됩니다.
- 본체 하단 특히 **배터리 커버**에 물이나 약물이 닿으면 안됩니다.

세정하기
(필요시)

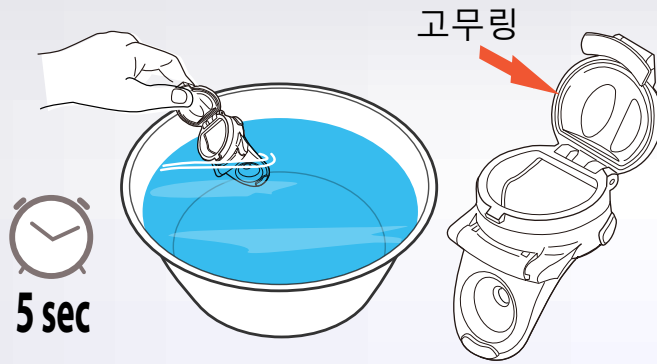

- 너무 잦은 세정은 변색이나 변이가 발생할 수 있습니다.
- 세정 과정에서 약물통 뚜껑안 고무링("O")이 분실될 수 있습니다.
- 담그는 시간(5초 이내) 준수 바랍니다.

배터리 조립 시
주의 사항

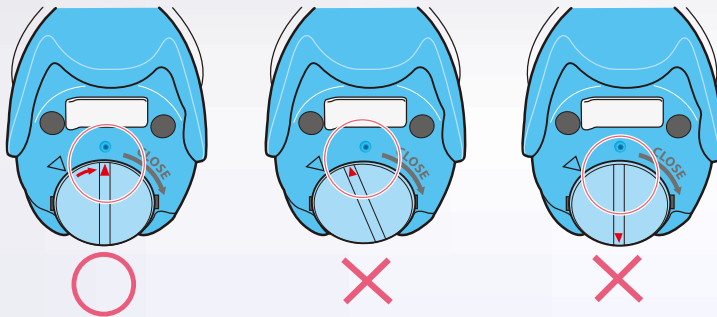

- 배터리 커버가 잘못 조립되면 전원이 들어오지 않습니다.
- 배터리 커버의 화살표와 본체의 등근 표시가 맞닿아야 합니다.